

Reinigen, Finieren und Hochglanzpolieren



OneGloss und SuperBuff

OneGloss – Finieren und Polieren mit einem Instrument

Die OneGloss-Instrumente eignen sich zum Finieren und Polieren von Kompositen in einem Arbeitsgang, zum Abtragen von Eingliederungszementen ohne Beschädigung empfindlicher Inlays sowie zum Abtragen von Oberflächenverfärbungen ohne Beschädigung des Zahnschmelzes.

Super-Snap SuperBuff – Hochglanzpolitur von Komposit-Restaurationen

Die SuperBuff-Scheibe ist ein Universal-Instrument für die Hochglanzpolitur von direkten und indirekten Komposit-Restaurationen. Die mit Paste imprägnierte Filzscheibe entwickelt nach dem Anfeuchten einen cremigen Schaum, der in kürzester Zeit bei Politur zu Hochglanz führt.



Proven Products for Better Dentistry

Mit System zum Hochglanz

OneGloss – Zwei in einem

OneGloss-Instrumente bestehen aus hochkonzentriertem Aluminiumoxid mit relativ wenig keramischem Bindemittel.

OneGloss ermöglicht Finieren und Polieren mit nur einem Instrument. Allein durch Veränderung des Anpressdrucks bestimmen Sie die Qualität Ihrer Arbeit.

- Andruck mit ca. 1,0 Newton → Finieren
- Andruck mit ca. 0,3 Newton → Polieren

Bestellinformationen



Form	Kelch	Midispitze	IC	Minispitze	Mandrell
ISO-Nr.	060	060	100	030	
Best.-Nr.	0181	0182	0183	0186	0435


OneGloss wird in folgenden Formen geliefert:

- Kelch für Höcker, inzisal, okkusal
- Midispitze für okkusal, labial, lingual, bukkal
- IC für labial, lingual, bukkal, interproximal
- Minispitze, montiert, für Fissuren, zervikal

OneGloss Kit

mit je 20 unmontierten Polierern, 3 Mandrells, W-Schaft
Best.-Nr. 0180

SuperBuff – Hochglanzpolitur von Komposit-Restaurationen

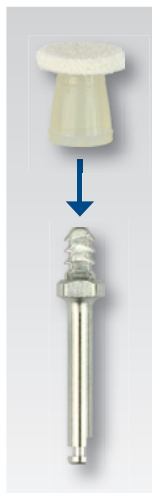

Die Filzoberfläche der **SuperBuff**-Scheibe ist mit Poliermittel durchsetzt. Vor der Anwendung wird die Scheibe angefeuchtet und entwickelt an der Oberfläche einen cremigen Schaum.

Die Scheibe kann frontal und mit dem flachen Rand verwendet werden. Sie wird unmontiert geliefert und mit einem Super-Snap Mandrell angewendet.

- imprägnierte Scheibe arbeitet sauberer
- schneller als eine Politur mit Pasten
- poliert alle Composite
- aktivierbar durch Wasser

Bestellinformationen

Super-Snap SuperBuff Set

mit 25 Polierern und 2 Mandrells, W-Schaft
Best.-Nr. 0535

Nachfüllpackung mit 50 Stück

Best.-Nr. 0536

Winkelstück-Mandrells, Packung mit 6 Stück

Best.-Nr. 0439



Super-Snap SuperBuff Set
Best.-Nr. 0535



OneGloss Kit
Best.-Nr. 0180



SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen
Tel.: +49 (0) 21 02 / 86 64-0 · Fax: +49 (0) 21 02 / 86 64-64
E-Mail: info@shofu.de · www.shofu.de