

CONSIGLI & TRUCCHI

Scoprite tutto il potenziale della vostra fotocamera dentale EyeSpecial. Nella sezione "Consigli & trucchi" scoprirete come avere immagini ottimali, flussi di lavoro efficienti e un'archiviazione sicura. In questo modo potrete ottenere una qualità d'immagine eccellente, documentare i risultati in modo chiaro e comprensibile e supportare un'informazione professionale del paziente.

SHOFU Gummy-V per la presa del colore

Con il supporto per campioni cromatici color gengiva SHOFU Gummy-V e un campione di colore è possibile riprodurre le caratteristiche naturali del cavo orale e neutralizzare l'effetto di contrasto creato dalla gengiva durante la presa del colore. Inoltre, nella ricostruzione dell'estetica bianco-rosa, Gummy-V offre una base ottimale per classificare cromaticamente le caratteristiche gengivali individuali del paziente.

Durante l'abbinamento cromatico, assicurarsi di tenere sempre i campioni di colore con lo stesso angolo e alla stessa distanza dal dente del paziente. In questo modo si ottengono risultati riproducibili.



Ottimale alimentazione energetica

La fotocamera dentale EyeSpecial funziona con batterie AA. Tuttavia, le comuni batterie alcaline AA spesso non sono sufficientemente potenti per fornire l'energia necessaria per garantire un funzionamento affidabile.

Per un utilizzo fluido ed efficiente della fotocamera si consiglia di utilizzare batterie ricaricabili NiMH con una capacità di almeno 2.450 mAh. Dopo l'acquisto o dopo un lungo periodo di inutilizzo, le batterie potrebbero essere parzialmente scariche e non raggiungere inizialmente la loro massima prestazione. Dopo due o tre cicli completi di carica e scarica le batterie recupereranno la loro piena capacità.

Utilizzare sempre e soltanto batterie dello stesso tipo e non abbinare batterie di marche diverse né batterie con livelli di carica differenti.


Le seguenti batterie NiMH sono risultate affidabili nell'utilizzo con EyeSpecial:



Tipo:	eneloop Pro AA 2.500 mAh	IKEA LADDA AA 2.450 mAh
Denominazione:	BK-3HCCE/4BE	505.046.92
Capacità minima:	2.500 mAh	2.450 mAh
Tensione:	1,2 V	1,2 V

Archiviazione sicura dei dati con la giusta scheda SD

Sul mercato è disponibile un'ampia gamma di schede SD di diversi produttori, il che può rendere difficile la scelta di una scheda di memoria adeguata. Su richiesta, saremo lieti di fornirvi informazioni su quale scheda SD sia adatta alla vostra EyeSpecial. In questo modo avrete la certezza di utilizzare una scheda di memoria compatibile e perfettamente adatta alla vostra fotocamera.

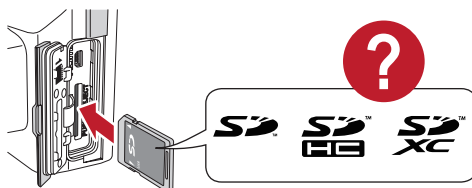

Trasferimento dei dati semplificato

Per il trasferimento diretto delle foto scattate con la fotocamera dentale EyeSpecial a un dispositivo mobile, i lettori di schede SD, ad esempio con connessione USB-C, rappresentano una soluzione pratica.

Le immagini vengono visualizzate direttamente nell'app Foto del dispositivo e sono subito disponibili per un ulteriore utilizzo. In questo modo si semplifica il trasferimento dei dati evitando il passaggio spesso necessario attraverso un PC. Ciò contribuisce a un flusso di lavoro più efficiente e flessibile.



Modalità di scatto personalizzate

Oltre alle nove modalità di scatto appositamente sviluppate, EyeSpecial consente di creare modalità personalizzate. E' così possibile salvare in modo permanente impostazioni utilizzate frequentemente, ma diverse da quelle preimpostate dalla fotocamera, e richiamarle rapidamente quando necessario.

Ad esempio, è possibile salvare come modalità di scatto personalizzata regolazioni individuali della saturazione del colore, della luminosità o del contrasto. Questa funzione è particolarmente utile quando determinate impostazioni vengono utilizzate regolarmente.

Inoltre, tramite un codice QR è possibile integrare nella fotocamera ulteriori modalità di utilizzo, ad esempio per la fotografia di modelli in gesso o per l'acquisizione di immagini radiografiche. Il codice QR corrispondente è riportato nel manuale d'uso.



Foto: H. Nickel, foto macro scattata con EyeSpecial

Ottimizzare i ritratti

Per una migliore qualità delle immagini senza ombre fastidiose, consigliamo l'uso di un flash esterno.

Nella modalità flash «Trigger», la fotocamera emette un debole impulso luminoso che attiva in modo sincronizzato un flash esterno compatibile (ad es. Nissin Digital i40 in modalità SF).

L'illuminazione vera e propria è generata dal flash esterno. La sua intensità può essere regolata direttamente sull'apparecchio.



Nella modalità SF di Nissin Digital i40, l'intensità della luce può essere regolata manualmente tramite la manopola di regolazione.



Modalità automatica



Modalità Trigger

Esempi di utilizzo

- Il flash può essere orientato verso il soffitto, in modo che il paziente venga illuminato dalla luce riflessa dal soffitto.
- In alternativa, il flash può essere posizionato dietro il paziente, così da ottenere ugualmente un'illuminazione indiretta.



Mantenere aggiornato il software per un funzionamento ottimale

Per problemi generali può essere utile innanzitutto verificare che sia la fotocamera sia il computer utilizzino la versione più recente del firmware/software. Un aggiornamento del software garantisce spesso una maggiore stabilità e funzionalità.

Le versioni più recenti e le relative istruzioni sono disponibili sul sito web indicato di seguito, nella sezione "Important software information for download".



Ulteriori domande?

Se avete bisogno di supporto nell'utilizzo della vostra fotocamera dentale, il vostro consulente specializzato SHOFU di zona potrà fornirvi informazioni utili e un'assistenza personalizzata.

Inoltre, sul sito www.shofu.de/en sono disponibili per il download il manuale d'uso e una guida step-by-step che possono servire come pratico supporto per l'utilizzo della fotocamera.



<https://www.shofu.de/en/products/eyespecial-c-v>



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan
SHOFU DENTAL GmbH An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany, www.shofu.de
SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders.
SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.