

EyeSpecial C-V

SHOFU Cross Polarizer

NL

Lees de 'Belangrijke veiligheidsinstructies' van de EyeSpecial C-V voordat u dit polarisatiefilter gebruikt.

Dit product is alleen geschikt voor de EyeSpecial C-IV en nieuwere modellen. Het is niet compatibel met de voorgangermodellen EyeSpecial C-II en C-III.

Beoogd gebruik

Het beter doen uitkomen van de oppervlaktestructuur of inwendige structuur van natuurlijke gebits-elementen, zoals mamelonstructuren of barstjes die bij een 'normale' opname nauwelijks zichtbaar zijn.

Vorbereiding

Activeer de modus voor kruispolarisatie voordat u het filter voor de eerste keer gebruikt (activering is maar één keer nodig).

1. Activeren van de modus voor kruispolarisatie

Scan de onderstaande QR-code om de modus voor kruispolarisatie te activeren. Als de melding 'Change the optional setting?' verschijnt, drukt u op 'OK'.



QR-code voor het activeren van de modus voor kruispolarisatie

2. Opslaan als gebruikersgedefinieerde modus

Scan de onderstaande QR-code om de modus voor kruispolarisatie als gebruikersgedefinieerde modus (custom) op te slaan. Als de melding 'Select the number' verschijnt, kiest u een van de drie gebruikersgedefinieerde instellingen. Zorg er hierbij voor dat de camera in de opnamemodus staat (dit is een van de negen voorgeprogrammeerde modi). U kunt namelijk geen QR-code scannen in de gebruikersgedefinieerde modus.



voor EyeSpecial C-IV



voor EyeSpecial C-V

QR-code voor het opslaan van de gebruikersgedefinieerde modus

Fotograferen

1. Selecteer de gebruikersgedefinieerde modus

Voordat u een foto maakt, controleert u of het symbool voor de gebruikersgedefinieerde modus links boven op het scherm wordt weergegeven.




2. Monteer de macrolens

Monteer de macrolens op het objectief van de camera en draai hem met de klok mee totdat hij goed vastzit.

3. Breng het polarisatiefilter aan

Plaats de SHOFU Cross Polarizer voorzichtig op de macrolens, zoals aangegeven op de tekening hiernaast, totdat hij hoorbaar vastklikt.

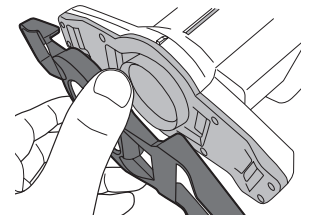


4. Maak een foto

Een foto maken gaat op dezelfde manier als in de modus Telemacro. Zie hiervoor de gebruikershandleiding (User manual) van de camera.

5. Verwijder het polarisatiefilter


Om het polarisatiefilter er weer af te halen, tilt u voorzichtig de palletjes aan beide zijden van de camera op en drukt u het filter naar buiten.

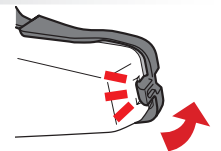

QR-code scannen



1 Druk in de opnamemodus op **Custom** of op de F2-toets

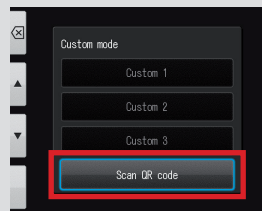

2 Selecteer "Scan QR code"



3 Druk op de ontspanknop om te gaan scannen



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com