

EyeSpecial C-V


Consignes de sécurité importantes

FR

 Pour les dernières informations en date relatives à EyeSpecial C-V, veuillez consulter www.shofu.de.

Contenu de la boîte

Lorsque vous ouvrez la boîte de l'EyeSpecial C-V pour la première fois, vérifiez qu'elle contient bien tous les éléments suivants. Veuillez contacter votre revendeur SHOFU dès que possible si des éléments manquent.

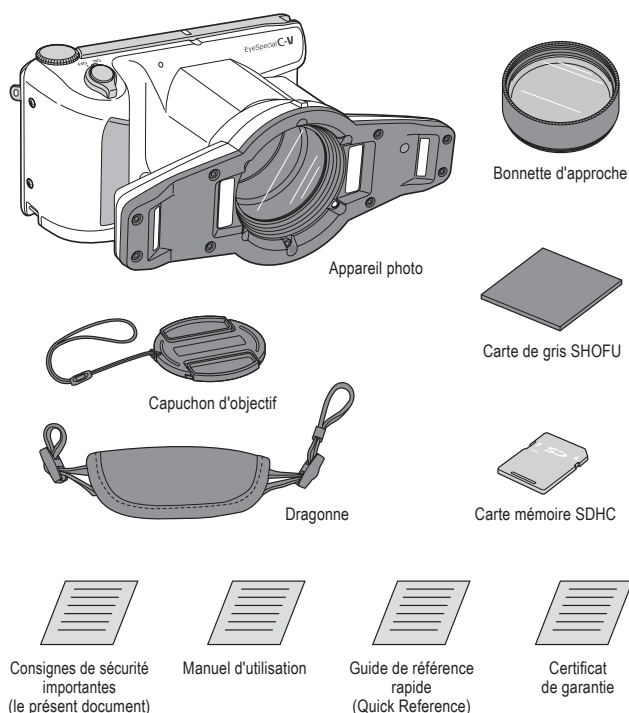

Accessoires en option

Les éléments en option suivants, vendus séparément, sont nécessaires pour utiliser cet appareil photo :



- Piles AA (piles alcalines / accumulateurs rechargeables nickel-hydrure métallique (Ni-MH))
- Support de stockage : Carte SD/SDHC/SDXC
Si votre ordinateur ne dispose pas d'un port SD/SDHC/SDXC, veuillez acheter un lecteur externe de cartes SD/SDHC/SDXC pour pouvoir transférer vos données de la carte mémoire à l'ordinateur.
- Câble HDMI (HDMI, type A ↔ micro HDMI, type D)
Recommandation (pour un connecteur HDMI de type A : CAC-HD14EU15BK par ELECOM).

Consignes de sécurité

Il est impératif de lire attentivement les instructions suivantes pour utiliser le produit en toute sécurité.


Description des symboles « Avertissement » et « Attention »

Ces consignes de sécurité font appel aux deux symboles suivants pour la prévention des accidents pouvant occasionner des blessures ou la mort. Assurez-vous de bien comprendre la signification de ces symboles pour utiliser l'appareil en toute sécurité.

| | |
|--|--|
|  Avertissement | Le symbole « Avertissement » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner la mort ou des blessures graves. |
|  Attention | Le symbole « Attention » signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait occasionner des blessures légères ou modérées ou des dommages matériels. |

Autres remarques et signes

D'autres remarques et signes utilisés dans le manuel d'utilisation sont détaillés ci-dessous :

 **Remarque** Indique que des dysfonctionnements potentiels peuvent survenir si la description est ignorée.

 **Info** Explication supplémentaire pour faciliter l'utilisation de l'appareil photo.

Lors de l'utilisation

Avertissement

- **Si l'appareil photo surchauffe, s'il produit une odeur de brûlé, s'il émet de la fumée ou présente tout signe de fonctionnement anormal, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez les piles. Il est également possible que les piles aient surchauffé. Prenez soin de ne pas vous brûler en les retirant.**

La non prise en compte de ces mises en garde et la poursuite de l'utilisation peuvent occasionner un choc électrique, des brûlures et une combustion spontanée. Contactez immédiatement votre revendeur SHOFU pour une réparation de l'appareil.

- **Si des composants internes de l'appareil photo sont exposés suite à une chute ou à son endommagement, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez les piles en prenant soin de ne pas toucher les parties exposées.** Le flash fonctionne sous haute tension et pourrait provoquer un choc électrique. La non prise en compte de ces mises en garde et la poursuite de l'utilisation peuvent occasionner un choc électrique, des brûlures ou un incendie. Veuillez contacter votre revendeur SHOFU qui vous communiquera des instructions pour la maintenance et l'entretien.
- **Tenir hors de la portée des enfants.** Faites extrêmement attention lorsque vous utilisez cet appareil photo près d'enfants pour éviter accidents ou blessures.

- **Ne démontez jamais, ni n'essayez de réparer ou remettre en état l'appareil photo par vous-même.**

Cet appareil comporte quelques pièces sous haute tension. Si vous touchez des composants internes, il y a risque de choc électrique. Toute manipulation incorrecte pourrait également provoquer un dysfonctionnement de l'appareil photo et occasionner des blessures, un choc électrique ou un incendie. Veuillez contacter votre revendeur SHOFU si une réparation ou une révision sont nécessaires.

- **Ne déclenchez pas le flash à proximité immédiate des yeux. Utilisez des lunettes de protection lors de l'utilisation du flash près des yeux.**
L'exposition à la lumière intense produite par le flash pourrait entraîner des lésions oculaires.

- **Si un corps étranger (métal, liquide ou poudre/poussière) pénètre à l'intérieur de l'appareil photo, cessez immédiatement de l'utiliser et retirez les piles de l'appareil.**

Si vous continuez à utiliser l'appareil photo, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique. Consultez votre revendeur SHOFU pour obtenir de l'aide.

- **N'utilisez pas cet appareil photo dans un espace très réduit tel qu'un sac, une boîte ou un tiroir.**

Cela pourrait entraîner une surchauffe ou provoquer un incendie en raison de l'évacuation insuffisante de la chaleur.

- **N'utilisez pas cet appareil photo dans des endroits où il risque de se mouiller facilement, notamment près d'un lavabo, d'un évier, d'un réservoir d'eau ou de tout endroit où vous utilisez de l'eau. Ne placez rien qui contienne un liquide sur l'appareil photo.**

Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

- **N'utilisez pas cet appareil photo dans des endroits tels qu'un lieu rempli de gaz hautement combustible ou un lieu de stockage d'essence, de benzène ou de solvant.**

Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

- **N'utilisez pas cet appareil photo dans un avion ou dans d'autres lieux où l'utilisation du réseau local sans fil est restreinte ou interdite. Vous risqueriez de provoquer des accidents.**

Attention

- **En cas d'utilisation prolongée de cet appareil photo, évitez le maintien du contact avec la peau.**

Le corps de l'appareil photo chauffe et peut occasionner une brûlure.

- **Ne retirez pas les piles ni la carte mémoire SD immédiatement après une utilisation prolongée.**

Les piles et la carte SD peuvent chauffer pendant l'utilisation. Le contact avec des piles et une carte chaudes peut occasionner une brûlure de la peau. Arrêtez l'appareil photo et attendez qu'il refroidisse.

- **N'utilisez pas le flash s'il est recouvert par vos doigts ou un objet quelconque.**

Le flash produit de la chaleur et pourrait occasionner une brûlure.

- **N'appuyez pas trop fort sur l'écran à cristaux liquides et ne forcez pas.**
Cela pourrait casser l'écran et provoquer des blessures. Si le liquide contenu à l'intérieur entre en contact avec la peau, rincez-la immédiatement à l'eau.

En cas de contact avec les yeux, rincez-les immédiatement et abondamment à l'eau et demandez un avis médical.

- **Manipulez délicatement l'appareil photo et ses accessoires.**

Une manipulation brutale et imprudente pourrait occasionner des blessures.

- **Utilisez toujours la dragonne ou la sangle de cou.**

- **Il convient de contrôler périodiquement la dragonne dans le but d'identifier un desserrement ou une usure éventuelle du cordon.**

Ignorer les anomalies et continuer à utiliser l'appareil photo pourrait occasionner des blessures.

Entretien et rangement

Avertissement

- **Il convient de tenir les petits accessoires hors de la portée des enfants pour éviter une ingestion accidentelle.**
En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- **N'utilisez pas de solutions fortement combustibles telles que du benzène ou un solvant pour nettoyer cet appareil photo.**
Cela pourrait provoquer une explosion ou un incendie.

Attention

- **Évitez d'utiliser et de ranger cet appareil photo (y compris les piles) sous un rayonnement solaire direct, dans des conditions de température ou d'humidité élevées ou près d'un feu. Il convient également d'éviter d'utiliser ou de ranger l'appareil photo dans des endroits où des gaz corrosifs sont générés, où il y a des fluctuations de température extrêmes, beaucoup de poussière ou d'huile, beaucoup d'électricité statique, ou à proximité de machines générant un fort magnétisme ou des ondes électromagnétiques.**
Une utilisation ou un rangement en de tels endroits pourraient provoquer un endommagement, une déformation de l'appareil, une fuite du liquide contenu dans les piles, la production de chaleur, une explosion, un incendie ou des blessures.

Batteries

Avertissement

Risque d'explosion

- **Si les batteries sont remplacées par un modèle non conforme, il y a risque d'explosion, de choc électrique ou d'incendie. N'utiliser que celles recommandées. Éviter toute batterie endommagée ou déformée.**
- **Jeter des batteries au feu ou dans un four, les écraser ou les couper entraîne un risque d'explosion, d'électrocution ou d'incendie. Ne jamais jeter de piles au feu ou au four. Ne pas tenter de les écraser ou de les couper.**

Risque d'explosion ou de fuite de liquide

- **L'utilisation, le stockage ou le transport de batteries à des températures très élevées ou très basses peuvent entraîner des risques d'explosion, de fuite de liquide, de choc électrique ou d'incendie. Ne pas utiliser, stocker ou transporter les batteries à des températures extrêmes.**
- **L'utilisation, le stockage ou le transport des batteries sous faible pression atmosphérique à haute altitude entraîne des risques d'explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflammable, de choc électrique ou d'incendie. Ne pas utiliser, stocker ou transporter les batteries sous basse pression atmosphérique à haute altitude.**
- **Laisser les batteries dans un endroit très chaud peut entraîner des risques d'explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflammable, de choc électrique ou d'incendie. Ne jamais laisser de batteries dans un environnement à température extrêmement élevée.**
- **Laisser les batteries dans un environnement à faible pression atmosphérique entraîne un risque d'explosion, de fuite de liquide ou de gaz inflammable, de choc électrique ou d'incendie. Ne jamais laisser de batteries dans un environnement à faible pression atmosphérique.**



Manufacturer
SHOFU INC.

11 Kamitakamatsu-cho,
Fukuine, Higashiyama-ku,
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com