

# OneGloss®



## Valymas, užbaigimas ir poliravimas

**OneGloss – vieno etapo apdailos ir poliravimo priemonė**

OneGloss instrumentais bet kokius kompozitinius paviršius galite greitai ir tiksliai užbaigti bei nupoliruoti. Poliravimo priemonės puikiai tinka dervos ar cemento pertekliui pašalinti, nepažeidžiant trapių įklotų bei paviršinių dantų pigmentinių dėmių pašalinimui, nepažeidžiant emalio.



# Vienas sprendimas visoms kompozitinėms restauracijoms

## OneGloss – du viename

OneGloss poliruokliai yra pagaminti iš didelės koncentracijos aliuminio oksido ir rišamosios medžiagos – silikono.

OneGloss yra vieno etapo užbaigimo ir poliravimo priemonė.

Tereikia pakeisti spaudimo stiprumą ir nuo užbaigimo galite pereiti prie poliravimo.

– spaudimas: apie 1,0 niutoną → užbaigimas

– spaudimas: apie 0,3 niutonų → poliravimas

## Formos

OneGloss galima rinktis iš šių formų:

- puodelio: kauburams, kadamajam kraštui ir okliuziniam paviršiui
- vidutinio smailumo kūgio formos: okliuziniam, labialiniam, liežuviniam ir skruostiniam paviršiams
- IC (diskelio formos): labialiniams, liežuviniams, skruostiniams ir interproksimaliniams paviršiams
- smailaus kūgio formos: vagelėms



Forma	Puodelis	Vid. smailumo kūg	IC	Smailus kūg	Laikiklis
ISO-nr.	060	060	100	030	
PN	0181	0182	0183	0186	0435

## OneGloss Set

OneGloss rinkinyje yra po 20 vienetų puodelio formos, vidutinio smailumo kūgio formos poliravimo instrumentų ir IC bei 3 CA laikikliai.

PN 0180



## OneGloss Smailus kūg

OneGloss Smailus kūg yra po 12 vienetų

PN 0186



SHOFU DENTAL GMBH

Am Brüll 17 • 40878 Ratingen Vokietija

Tel.: + 49 (0) 21 02 / 86 64-0

Faksas: + 49 (0) 21 02 / 86 64-64

El paštas: info@shofu.de • www.shofu.de