

Super-Snap

X-TREME

FINIEREN & POLIEREN

&

Super-Snap



Hochwertige Finier- und Polierscheiben

Super-Snap X-Treme

Modernste 3-D-Technologie in nur zwei Schritten


Die neuen Super-Snap X-Treme-Polierscheiben – eine Weiterentwicklung der etablierten grünen und roten Super-Snap-Scheiben – zeichnen sich durch längere Standzeiten und eine erhöhte Festigkeit aus, ihre bekannte Flexibilität im interproximalen Bereich bleibt jedoch erhalten.



Politur mit Super-Snap X-Treme Standard-Disk



Hochglanzpolitur mit Super-Snap X-Treme Mini-Disk

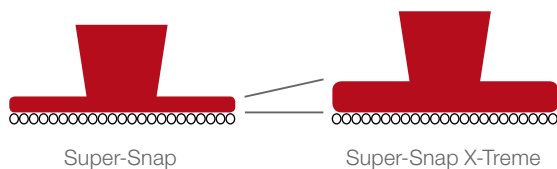

Die beidseitig beschichteten Super-Snap X-Treme-Scheiben (Mini- und Standard-Durchmesser) sind dicker als die Super-Snap-Scheiben, wodurch ein höherer Anpressdruck bei der Politur ermöglicht wird. Die zusätzliche Dicke erzeugt eine größere Taktilität und führt zu einer optimierten Hochglanzpolitur.

- Weiterentwicklung der ursprünglichen grünen und roten Super-Snap-Scheiben
- Extra dick für mehr Steifheit, Taktilität und Widerstandsfähigkeit bei weiterhin hoher Flexibilität im Approximalbereich
- Neue 3-D-Beschichtung verhindert das Zusetzen der Oberfläche
- Sehr hoher Glanzgrad mit extrem niedriger Oberflächenrauigkeit erzielbar
- Beidseitig mit Aluminiumoxid beschichtet
- 2 Größen: Standard (12 mm) und Mini (8 mm)


Super-Snap X-Treme Oberflächenkörnung, 400-fache Vergrößerung





Grüne Disk - fein
Polieren



Rote Disk - extrafein
Hochglanz

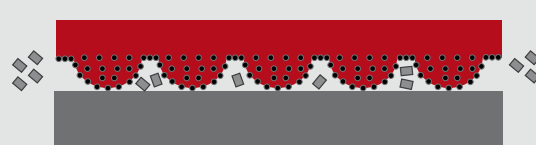


Kein Zusetzen der Oberfläche und keine Sekundärkratzer dank der neuen 3-D-Beschichtung der roten Scheiben: Zwischen den homogen verteilten Halbkugeln aus Aluminiumoxid-Partikeln kann sich der Politurabrieb ablagern und wird nach außen transportiert.

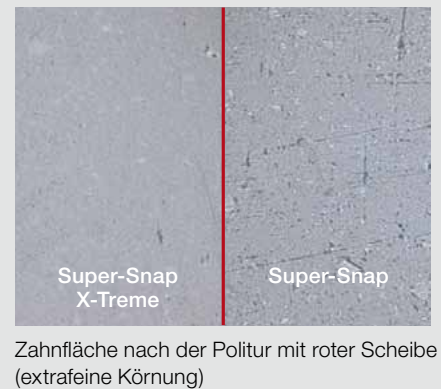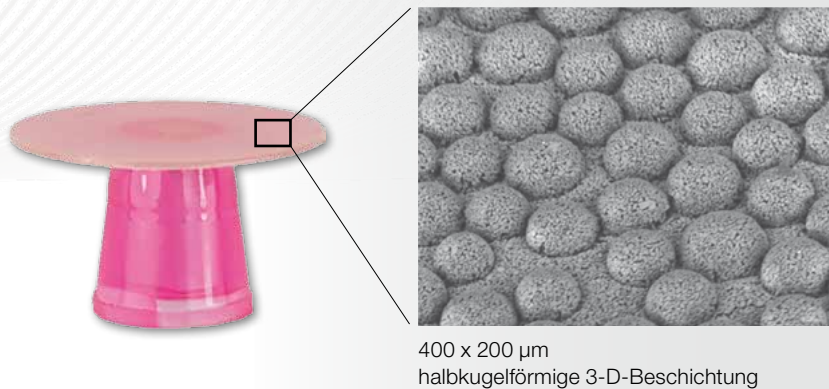

Auf Hochglanz polieren – ohne Zusetzen der Oberfläche

Die roten Super-Snap X-Treme-Scheiben stellen eine Besonderheit dar: Sie weisen erstmals eine Oberfläche mit einer 3-D-Beschichtung aus Aluminiumoxid-Partikeln auf, die das Zusetzen oder Verklumpen der Scheibenoberfläche und Sekundärkratzer durch Polierstaub sicher verhindert.

Glanzgrad (Gs)

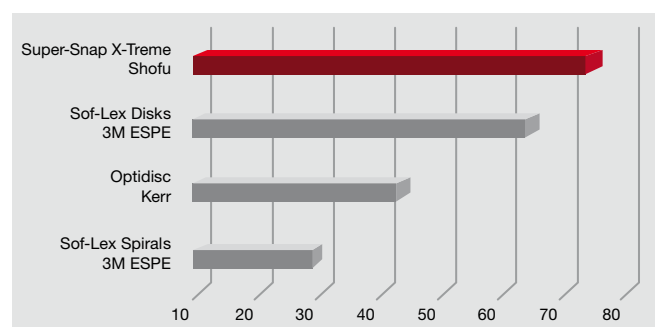

Quelle: F&E, SHOFU INC. Alle Marken sind Eigentum der jeweiligen Hersteller.

Super-Snap

Von THE DENTAL ADVISOR schon seit sechs Jahren in Folge als „Top Composite Finishing and Polishing System“ ausgezeichnet

Mit Super-Snap, dem 4-Schritt-Scheibensystem, können Sie alle mikrogefüllten und Nanohybrid-Komposite einfach, schnell und sicher konturieren, finieren und polieren.


Die Scheiben sind mit Siliziumkarbid bzw. Aluminiumoxid beschichtet und haben zur Vermeidung von Beschädigungen kein metallisches Zentrum.

- Farbcodiert nach Körnung: grob (schwarz), mittel (violett), fein (grün) und extrafein (rot)
- Sehr dünn und hochflexibel, ideal für den Approximallbereich
- Kein Metallzentrum, keine Beschädigungen
- Elastische Träger aus Silikon zum einfachen Aufsetzen auf das Mandrell

Super-Snap Oberflächenkörnung, 400-fache Vergrößerung




Schwarze Disk - grob
Konturieren

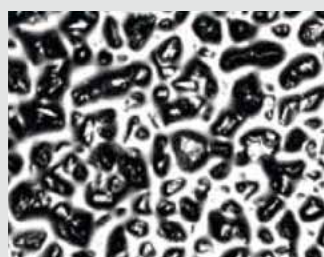

Violette Disk - mittel
Finieren





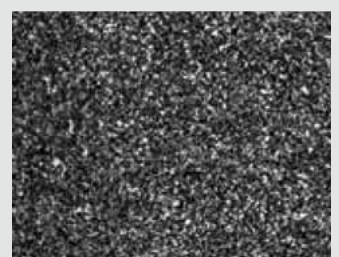

Grüne Disk - fein
Polieren



Rote Disk - extrafein
Hochglanz

Bestellinformationen

Super-Snap X-Treme

	Polieren		Hochglanz	
Super-Snap X-Treme				
50 St. / Pckg.	L511	L531	L512	L532
Farbe / Körnung	Grün / fein		Rot / extrafein	



Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit
je 50 Standard-Scheiben
in grün und rot

Best.-Nr. 0506



Super-Snap X-Treme Mini-Disk Kit
je 50 Mini-Scheiben
in grün und rot

Best.-Nr. 0507

Super-Snap

	Konturieren		Finieren				Polieren		Hochglanz	
Super-Snap										
50 St. / Pckg.	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
Farbe / Körnung	Schwarz / grob		Violett / mittel				Grün / fein		Rot / extrafein	

Super-Snap Rainbow Technique Kit

100 Scheiben Standard, 80 Scheiben Mini
40 Polierstreifen
2 Dura-White Steine (CN1 und FL2)
1 CompoSite Fine Midispitze
4 Winkelstück-Mandrells (Stahl)
Best.-Nr. 0500

Super-Snap Mini-Kit

32 Scheiben Standard, 16 Scheiben Mini,
1 CompoSite Fine Midispitze,
1 Winkelstück-Mandrell (Stahl)
Best.-Nr. 0505

Super-Snap Polierstreifen

100 Polierstreifen schwarz (grob) und violett (mittel)
Best.-Nr. L525
100 Polierstreifen grün (fein) und rot (extrafein)
Best.-Nr. L526

Mandrells

6 Winkelstück, Stahl
Best.-Nr. 0439
100 Winkelstück, Kunststoff
Best.-Nr. 0440



SHOFU INC. 11 Kamitakamatsu-cho, Fukuine, Higashiyama-ku, Kyoto 605-0983, Japan (www.shofu.co.jp)
SHOFU DENTAL ASIA-PACIFIC PTE. LTD. 10 Science Park Road, #03-12 The Alpha, Science Park II, Singapore 117684 (www.shofu.com.sg)
SHOFU DENTAL TRADING (SHANGHAI) CO., LTD. No. 645 Jiye Road, Sheshan Industrial Park, Songjiang, Shanghai 201602, China (www.shofu.com.cn)
SHOFU DENTAL CORPORATION 1225 Stone Drive, San Marcos, CA 92078-4059, USA (www.shofu.com)
SHOFU UK Riverside House, River Lawn Road, Tonbridge, Kent, TN9 1EP, UK (www.shofu.co.uk)
SHOFU DENTAL GmbH  Am Brüll 17, 40878 Ratingen, Germany (www.shofu.de)
 SHOFU is a registered trademark of SHOFU INC. All other trademarks and registered trademarks are the property of their respective holders. SHOFU INC. reserves the right to change specifications without notice.