

CompoSite ■ CompoSite Fine



Für Komposit

Ohne den Schmelz zu beschädigen, dienen die CompoSite Instrumente der Politur und Hochglanzpolitur von Komposit-Restaurationen. CompoSite Polierer werden zum Ausarbeiten und zur Vorpolitur verwendet, CompoSite Fine (mit weißer Schaftmarkierung) zur Politur. Die flexiblen und sich den Oberflächen anpassenden Kelche und Scheiben polieren sicher subgingivale und interproximale Oberflächen. Birne und Midispitze eignen sich besonders zum Polieren okklusaler und linguale Oberflächen.



VORTEILE

- Silikonpolierer mit integrierten Schleifpartikeln
- Abgestimmte Härte des Silikons
- Optimales Verhältnis von Anpressdruck zu Umdrehungszahl
- Zahnschmelz schonend
- Kein zusätzliches Poliermittel erforderlich
- Hohe Standzeit



W-Schaft:

Min⁻¹ Empf. 10.000 - 12.000 / Max. 20.000 / AD 0,5 N



FG-Schaft:

Min⁻¹ Empf. 10.000 - 12.000 / Max. 15.000 / AD 0,5 N

Anwendungsbereiche

■ IN DER ZAHNARZTPRAXIS

Finieren und Polieren von Mikro- und Hybridkomposit-Restaurationen, wie Inlays, Onlays, Kronen und Brücken im Mund des Patienten sowie zur Entfernung von Zementresten orthodontischer Bänder (Brackets)

| Best.-Nr. | Menge | Produkt |
|-----------------------|--------|--|
| 0191-0299, 196B, 296B | 12 St. | CompoSite / CompoSite Fine, Schaft W, FG |



| | Form | Walze | Linse | Rad | Scheibe | Kelch | Birne | IC | Midispitze |
|----------------|---------|-------|-------|------|---------|-------|-------|------|------------|
| | ISO-Nr. | 040 | 090 | 090 | 160 | 080 | 033 | 090 | 040 |
| CompoSite | W | 0191 | 0192 | 0193 | 0194 | 0195 | 0196 | 0197 | 0198 |
| | FG | | | | | | 196B | | 0199 |
| CompoSite Fine | W | 0291 | 0292 | 0293 | 0294 | 0295 | 0296 | 0297 | 0298 |
| | FG | | | | | | 296B | | 0299 |