

# CompoSite pasta lucidante

Per la lucidatura a specchio di compositi microriempiti o ibridi

La pasta lucidante CompoSite è composta da una morbida crema lucidante che, grazie alle particelle abrasive ultrafini di ossido di alluminio, assicura una lucidatura duratura e brillante dei restauri nella regione dei denti anteriori e posteriori.

## VANTAGGI

E' sufficiente usarne una piccola quantità

Dosaggio facile

Lucidatura a specchio veloce

Idrosolubile

## Indicazioni

### ■ IN STUDIO

Per la lucidatura di restauri in composito nel cavo orale, i migliori risultati si ottengono usando la pasta lucidante CompoSite in combinazione con i dischi lucidanti Super-Snap Buff Disk e Buff Mini-Disk.

### ■ IN LABORATORIO

Lucidatura di superfici in composito



Min<sup>-1</sup> Cons. 5.000 - 10.000

## info

Dopo la rifinitura e prelucidatura del restauro (per es. con i dischi lucidanti Super-Snap o con i gommini CompoSite) applicare una piccola quantità di pasta lucidante al centro di un disco Super-Snap Buff Disk o Buff-Mini-Disk umido.

Per evitare spruzzi, si consiglia di applicare uno strato sottile e uniforme di pasta lucidante sul feltrino e di lucidare con una leggera pressione e con un basso numero di giri (inferiore a 10.000 giri/min.).

Mantenere umida la pasta lucidante durante il processo di lucidatura. Alla fine eliminare con acqua eventuali residui.

PN	Quantità	Prodotto
0551	1 siringa	CompoSite pasta lucidante, 5 g

