

FL-Bond II

Sistema adesivo automordenzante, a rilascio di fluoro

FL-Bond II è un sistema adesivo automordenzante in due fasi che crea un legame eccellente con smalto e dentina per una sicura chiusura marginale. Il sistema si contraddistingue per la semplicità d'utilizzo e per le ottime caratteristiche di biocompatibilità. La consistenza abbastanza fluida di FL-Bond II consente una facile applicazione ed è particolarmente stabile sulle pareti digradanti delle cavità. Ciò garantisce uno spessore uniforme della pellicola su tutte le superfici della preparazione ed assicura un'adesione interna stabile.

Indicazioni

- Fissaggio adesivo di compositi alla sostanza dura del dente
- Pretrattamento della sostanza dura del dente per l'impiego di cementi a base di resina
- Riparazione di restauri

VANTAGGI

- Applicazione in 2 fasi facile e veloce
- Viscosità e adesione ottimali
- Radiopacità per una diagnostica affidabile
- Assorbimento e rilascio di fluoro
- Forze adesive durature



PN	Quantità	Prodotto
1306	1 pz.	FL-Bond II Kit Primer 5 ml, Bonding 5 ml, pennellini MicroBrush rosa e gialli, 25 pz. cad., 1 vaschetta di miscelazione, 1 coperchio
1307	5 ml	FL-Bond II Primer
1308	5 ml	FL-Bond II Bonding
1309	6 ml	FL-Bond II Etchant (soluzione mordenzante)

Utilizzo

1ª FASE: APPLICAZIONE DEL PRIMER


Il primer FL-Bond II contiene un nuovo efficace monomero adesivo ed un nuovo fotoiniziatore. Il primer automordenzante condiziona le superfici di smalto e dentina eliminando così la necessità di una mordenzatura separata con acido fosforico.

2ª FASE: APPLICAZIONE DEL BONDING

Il bonding FL-Bond II è composto da riempitivi S-PRG contenenti fluoro che offrono una protezione permanente contro le carie secondarie grazie ad un'ottimale remineralizzazione della circostante sostanza dura del dente. Grazie all'elevata percentuale di riempitivi FL-Bond II è particolarmente resistente all'abrasione e impedisce in modo efficace un'erosione nelle aree marginali con una sigillatura duratura.

Bassa viscosità

(Altri sistemi adesivi)

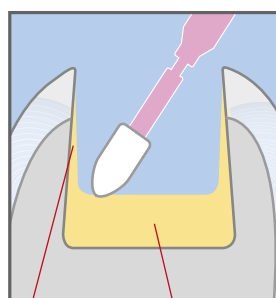


Strato di bonding estremamente sottile

Accumulo di liquido alla base della cavità

Viscosità moderata

(FL-Bond II)

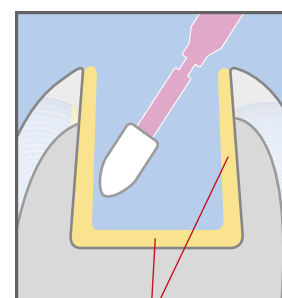

Spessore del bonding uniforme

info

La soluzione mordenzante FL-Bond II Etchant è particolarmente indicata per la mordenzatura prima dell'utilizzo di sistemi adesivi automordenzanti sullo smalto; contiene solo ca. 7% di acido fosforico.