

# OneGloss ■ OneGloss PS

Per composito e smalto dentale

I gommini OneGloss e OneGloss PS sono composti da ossido di alluminio altamente concentrato e da silicone come legante. I gommini OneGloss PS ("Plastic Shank" - gambo in plastica) sono già premontati su un robusto mandrino in plastica. La confezione igienica assicura uno stoccaggio ed un utilizzo semplici. I processi di lavoro nello studio dentistico risultano notevolmente semplificati trattandosi di gommini monouso.

Semplicemente modificando la pressione di utilizzo è possibile rifinire o lucidare con un solo strumento:

- Rifinitura con una pressione di utilizzo elevata (ca. 1,0 N)
- Lucidatura con una leggera pressione di utilizzo (ca. 0,3 N)
- Rimozione di residui di cemento e lucidatura di aree del dente con una pressione moderata e leggera
- Lucidatura dello smalto e rimozione di decolorazioni del dente semplicemente con una leggera pressione di utilizzo



# OneGloss ■ OneGloss PS (continua da pag. 25)

Per composito e smalto dentale



## Indicazioni

### ■ IN STUDIO

Gli strumenti sono indicati per la rifinitura e la lucidatura di restauri in composito e di superfici di smalto con un unico passaggio di lavoro, per la rimozione di cemento in eccesso senza danneggiare inlay delicati, per l'eliminazione di decolorazioni superficiali e per la lucidatura dello smalto dopo l'igiene dentale.



#### OneGloss:

**Min<sup>-1</sup>** Cons. 3.000 - 10.000 / Max. 15.000 /  
PU: 0,3 N per la lucidatura / 1,0 N per la rifinitura



#### OneGloss PS:

**Min<sup>-1</sup>** Cons. 3.000 - 5.000 / Max. 5.000 /  
PU: 0,3 N per la lucidatura / 1,0 N per la rifinitura



Forma	Coppa	Midipoint	IC	Minipoint	Mandrino
ISO-N.	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435

## info

Lavorare spruzzando acqua a intermittenza se si esercita una pressione di utilizzo elevata o per la lucidatura dello smalto.

I gommini OneGloss e OneGloss PS sono monouso.

## VANTAGGI

Gommini al silicone con ossido di alluminio

Ottimale rapporto tra pressione di utilizzo e numero di giri

Rifinitura e lucidatura con un unico strumento

Non si deve cambiare strumento

Non è necessario l'uso di pasta lucidante

Efficienza abrasiva ottimale

Lavorazione con limitate vibrazioni



I gommini OneGloss PS (Plastic Shank) sono disponibili come strumenti completi: le teste degli strumenti (Coppa, Midipoint, IC) sono premontati su un mandrino in plastica resistente.

PN	Quantità	Prodotto
<b>OneGloss</b>		
0180	1 pz.	OneGloss Kit 60 gommini non montati (20x coppa, midipoint, IC) e 3 mandrini CA
0181-0183	1 pz.	OneGloss confezione di ricarica 50 pz., non montato, forme: coppa, midipoint, IC
0186	12 pz.	OneGloss minipoint, montato, gambo CA
0435	6 pz.	mandrino CA
<b>OneGloss PS</b>		
0175	1 pz.	OneGloss PS Kit 50 pz.: 15 coppa, 15 IC, 20 midipoint, tutti confezionati singolarmente
0176	50 pz.	OneGloss PS, forma: coppa, tutti confezionati singolarmente
0177	50 pz.	OneGloss PS, forma: midipoint, tutti confezionati singolarmente
0178	50 pz.	OneGloss PS, forma IC, tutti confezionati singolarmente