

Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme

Per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi

Il sistema di lucidatura Super-Snap e Super-Snap X-Treme è composto da dischi rivestiti e da strisce lucidanti indicati per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi.



Indicazioni

IN STUDIO

Sgrossare, rifinire e lucidare fino ad ottenere una lucidatura a specchio di restauri in composito

- Sgrossatura: disco Super-Snap nero (a grana grossa)
- Rifinitura: disco Super-Snap viola (a grana media)
- Lucidatura: disco Super-Snap verde (a grana fine)
- Lucidatura a specchio: disco Super-Snap rosso (a grana extrafine)

Per la rifinitura e lucidatura nelle zone interprossimali utilizzare le strisce lucidanti Super-Snap.

La parte centrale non è in metallo

Si evitano così danneggiamenti e decolorazioni del composito e della sostanza dura del dente



Dischi sottili e flessibili

Si piegano senza rompersi e consentono un facile accesso alle zone interprossimali

Protezione in silicone del gambo

Il supporto elastico permette di posizionare facilmente il disco sul mandrino

VANTAGGI

Estremamente sottili e molto flessibili

Il centro non è in metallo

Sistema ottimizzato: dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio in quattro passaggi

Strisce lucidanti appositamente studiate per le aree interdentali

Nessun rischio di graffiare la sostanza dura del dente o il restauro

Tenuta stabile del disco sul mandrino (massimo controllo durante la lucidatura)



Min⁻¹ Cons. 10.000 - 12.000 / Max. 15.000 /
PU 0,3 - 0,6 N

■ Dischi Super-Snap

I dischi Super-Snap sono dotati di supporti elastici che vengono posizionati sul mandrino. Non avendo una parte centrale in metallo, si evitano danneggiamenti involontari e decolorazioni del composito e della sostanza dura del dente. I dischi sottili sono flessibili, si piegano senza rompersi e consentono un facile accesso alle aree prossimali. Sono disponibili con rivestimento sul lato superiore, sul lato verso il

gambo e su entrambi i lati e nelle misure standard (ø 12 mm) e mini (ø 8 mm).

■ Strisce lucidanti Super-Snap

Al sistema di lucidatura Super-Snap appartengono anche le strisce lucidanti coordinate, che presentano la stessa granulometria e lo stesso rivestimento dei dischi. Assicurano anche negli spazi interdentali un trattamento superficiale e una lucidatura ottimali.

	Sgrossare		Rifinire				Lucidare		Lucidare a specchio	
Dischi										
	L506	L507	L508	L509	L528	L522	L501	L519	L502	L521
	nero (grana grossa)		viola (grana media)				verde (fine)		rosso (extrafine)	
Mandrini										
	0438			0439			0440			
	FG			CA			CA (resina)			
Strisce lucidanti										
	L525						L526			
	nero (grana grossa) / viola (grana media)						verde (fine) / rosso (extrafine)			

PN	Quantità	Prodotto
		Super-Snap
0500	1 pz.	Super-Snap Rainbow Technique Kit, gambo CA (vedi pag. 30)
0505	1 pz.	Super-Snap Mini-Kit, gambo CA
L506	50 pz.	Dischi Super-Snap, nero (a grana grossa), con rivestimento sul lato superiore
L507	50 pz.	Mini dischi Super-Snap, nero (a grana grossa), con rivestimento sul lato superiore
L508	50 pz.	Dischi Super-Snap, viola (a grana media), con rivestimento sul lato superiore
L509	50 pz.	Dischi Super-Snap, viola (a grana media), con rivestimento dalla parte del gambo
L528	50 pz.	Dischi Super-Snap, viola (a grana media), con rivestimento su entrambi i lati
L522	50 pz.	Mini dischi Super-Snap, viola (a grana media), con rivestimento su entrambi i lati
L501	50 pz.	Dischi Super-Snap, verde (fine), con rivestimento su entrambi i lati
L519	50 pz.	Mini dischi Super-Snap, verde (fine) con rivestimento su entrambi i lati
L502	50 pz.	Dischi Super-Snap, rosso (extrafine), con rivestimento su entrambi i lati
L521	50 pz.	Mini dischi Super-Snap, rosso (extrafine), con rivestimento su entrambi i lati
L525	100 pz.	Strisce lucidanti Super-Snap, nero / viola (a grana grossa / media)
L526	100 pz.	Strisce lucidanti Super-Snap, verde / rosso (fine / extrafine)

PN	Quantità	Prodotto
		Super-Snap X-Treme
0508	1 pz.	Super-Snap X-Treme Technique Kit, gambo CA (vedi pag. 30)
0506	1 pz.	Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit, 50 dischi Super-Snap X-Treme verdi e 50 rossi
0507	1 pz.	Super-Snap X-Treme Mini Disk Kit, 50 mini dischi Super-Snap X-Treme verdi e 50 rossi
L511	50 pz.	Dischi Super-Snap X-Treme, verde (fine), con rivestimento su entrambi i lati
L512	50 pz.	Dischi Super-Snap X-Treme, rosso (extrafine), con rivestimento su entrambi i lati
L531	50 pz.	Mini dischi Super-Snap X-Treme, verde (fine), con rivestimento su entrambi i lati
L532	50 pz.	Mini dischi Super-Snap X-Treme, rosso (extrafine), con rivestimento su entrambi i lati
		Mandrini
0438	6 pz.	mandrino FG *
0439	6 pz.	mandrino CA, acciaio
0440	100 pz.	mandrino CA, resina

* Usare il gambo FG solo se sono disponibili motori lenti con il supporto FG.

I dischi Super-Snap e Super-Snap X-Treme e le strisce lucidanti sono articoli monouso.



Super-Snap ■ Super-Snap X-Treme (continua da pag. 29)

Per la lucidatura di compositi microriempiti e ibridi

■ Dischi Super-Snap X-Treme


I dischi di lucidatura Super-Snap X-Treme – un'evoluzione dei dischi Super-Snap verdi e rossi – sono più spessi e permettono di esercitare una pressione di utilizzo maggiore durante il processo di lucidatura. Si contraddistinguono per una durata più lunga ed una maggiore resistenza, mantenendo comunque la ben nota flessibilità nelle aree interprossimali.

Per la prima volta i dischi Super-Snap X-Treme rossi presentano un rivestimento innovativo tridimensionale.

Il materiale asportato con la lucidatura si può depositare tra le semisfere in ossido di alluminio distribuite in modo omogeneo e viene trasportato verso l'esterno.

In questo modo si evitano accumuli di materiale sulla superficie del disco e graffi secondari causati dalla polvere di lucidatura.

I dischi Super-Snap X-Treme (diametro mini e standard) presentano un rivestimento su entrambi i lati.

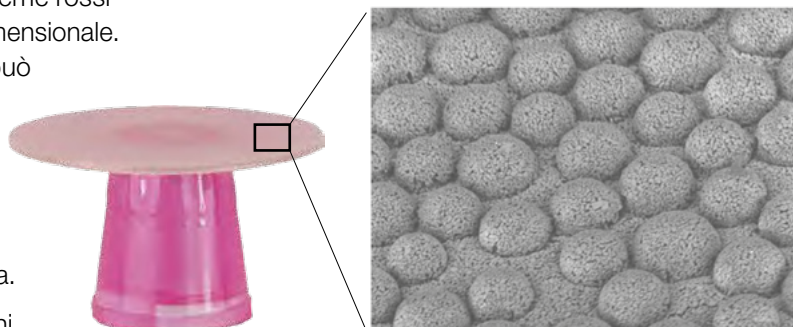

L D3,1 x400 200 µm



Il Super-Snap Rainbow Technique Kit contiene 180 dischi (100 pz. standard / 80 pz. mini) in quattro diverse granulometrie, 40 strisce lucidanti, 2 punte abrasive Dura-White (CN1 e FL2), 1 CompoSite Fine midpoint e 4 mandrini per contrangolo.



Il Super-Snap X-Treme Technique Kit contiene 160 dischi in quattro diverse granulometrie (80 pz. Super-Snap / 80 pz. Super-Snap X-Treme), 40 strisce lucidanti, 2 punte abrasive Dura-White (CN1 e FL2), 2 CompoSite midpoint, 2 CompoSite Fine midpoint e 4 mandrini per contrangolo.



Il Super-Snap Mini-Kit contiene dischi in tutte le granulometrie disponibili: 48 dischi (32 pz. standard / 16 pz. mini), 1 Composite Fine midpoint e 1 mandrino per contrangolo.



Il Super-Snap X-Treme Standard Disk Kit contiene 50 dischi standard verdi e 50 dischi rossi, mentre il kit Super-Snap X-Treme Mini-Disk contiene 50 dischi di lucidatura mini per colore (verdi e rossi).