


TPE diamantate

Punte diamantate sull'estremità superiore, atraumatiche per i tessuti, per la preparazione a spalla sottogengivale

Una caratteristica particolare di queste punte diamantate è costituita dalla porzione non diamantata verso la superficie di taglio, studiata appositamente per evitare di danneggiare il tessuto circostante o di creare un sotto-squadro nella parete assiale durante la preparazione a spalla. Le punte diamantate TPE (Tissue-Protective, End-Cutting) sono disponibili con dimensione normale della testa a grana fine e grossa, con testa corta solo a grana grossa.

PN	680C-1	680F-1	682C-1	682F-1	682S-1	684C-1	684F-1	684S-1	686C-1	686F-1
ISO-N.	010	010	012	012	012	014	014	014	016	016
Lunghezza testa (mm)	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Diametro (mm)	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6

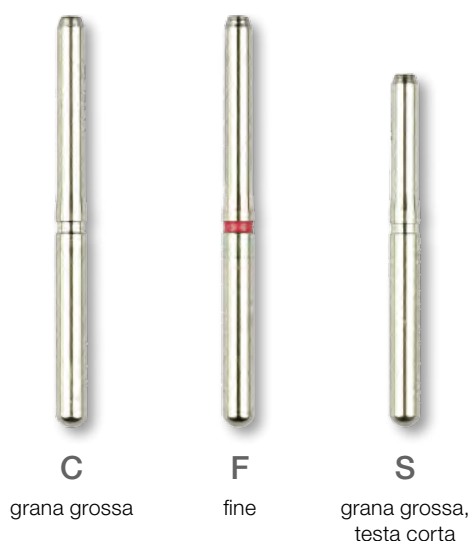

VANTAGGI

- Atraumatiche per i tessuti grazie al rivestimento diamantato sull'estremità superiore
- Perfettamente centrate
- Lunga durata
- Efficienza abrasiva costante

Indicazioni

IN STUDIO

- Grana grossa (C - senza contrassegno sul gambo): per la veloce riduzione della spalla sul solco gengivale
- Grana fine (F - con anello rosso sul gambo): per la finitura della spalla, la rifinitura della preparazione a spalla subgengivale


Si consiglia di utilizzare la fresa a testa corta (solo a grana grossa) per le preparazioni in punti difficilmente accessibili.

Campo d'impiego

Sostanza dura del dente: preparazione a spalla



TPE Diamonds Kit contiene nove punte diamantate selezionate.

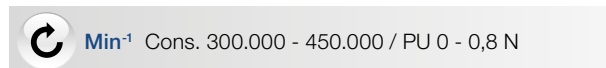

PN	Quantità	Prodotto
680C-1-686F-1	6 pz.	TPE diamantate, gambo FG
0688	1 pz.	TPE Diamonds Kit