

Полировочная паста CompoSite

для зеркальной полировки композитов с микро- и гибридным наполнителем

Полировочный материал CompoSite состоит из кремообразной пасты с субмикронными абразивными частицами оксида алюминия. Они придают реставрациям фронтальной и жевательной групп бриллиантовый блеск, который сохраняется в течение длительного времени.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Экономичный материал
- Простая процедура дозирования
- Быстро придает зеркальный блеск
- Растворяется в воде

Показания

■ В КАБИНЕТЕ

Полировка композитных реставраций в полости рта пациента. Для получения оптимального результата следует использовать полировочную пасту CompoSite с дисками Super-Snap Buff Disk и Super-Snap Buff Mini-Disk.

■ В ЛАБОРАТОРИИ

Полировка поверхностей непрямых композитных реставраций



Об./мин. Реком.: 5 000-10 000

Номер	Кол-во	Изделие
0551	1 шприц	Полировочная паста CompoSite, 5 г

Для справки

После выполнения финирирования и предварительной полировки (например, дисками Super-Snap или полирами CompoSite) нанесите небольшое количество полировочной пасты непосредственно на середину увлажненного диска Super-Snap Buff Disk или Buff-Mini Disk.

Чтобы разбрызгалось меньше пасты, нанесите ее на фетровый диск тонким, равномерным слоем и полируйте подготовленную поверхность легкими движениями на небольшой скорости (менее 10 000 об./мин.).

В течение всей процедуры полировки паста должна оставаться влажной. После завершения процедуры удалите оставшуюся пасту струей воды.

