

DirectDia Paste

полировочная паста, наполненная алмазной крошкой – для интра- и экстраоральной зеркальной полировки

Паста DirectDia на 20% состоит из синтетической алмазной крошки (размер частиц – 2-4 мкм), которая является абразивом. С ее помощью можно отполировать любую реставрацию до яркого блеска. Она разработана для полировки как естественных зубов, так и реставрационных материалов, таких как керамика, композиты для прямой реставрации и металлы. Паста обладает приятным ароматом лайма и светло-зеленым цветом, поэтому ее хорошо видно в полости рта пациента.



Для обработки полости требуется количество материала объемом с рисовое зерно



Используется диск Super-Snap Buff Disk



Благодаря зеленому цвету пасту хорошо видно в полости рта

Показания

- Удаление дисколорита с поверхности зуба и полировка до яркого блеска любого реставрационного материала
- Полировка и очистка естественных зубов от зубного налета

Номер	Кол-во	Изделие
0558	1 шприц	DirectDia Paste, 3 г 2 канюли для нанесения с колпачками

ПРЕИМУЩЕСТВА

Благодаря зеленому цвету пасту хорошо видно в полости рта пациента

Канюля гарантирует точную дозировку

С материалом удобно работать, т.к. вязкость точно рассчитана

Приятный аромат лайма

Для справки

Рекомендуется использовать с дисками Super-Snap Buff Disk и Buff Mini-Disk. Гибкие фетровые диски эффективно наносят материал и обрабатывают все участки естественного зуба.

Чтобы материал не разбрызгивался не допускайте перегрева и всегда используйте вращающиеся инструменты со скоростью ниже 10 000 об./мин.

Обрабатываемая поверхность не обязательно должна быть сухой; можно без проблем обрабатывать поверхность, на которой есть вода либо слюна. Затем тщательно промыть водой.

