

# Merssage ■ Pressage

профилактические пасты для всех показаний

Существуют разные виды этих паст. Пасты Merssage, содержащие фтор, удаляют налет и равномерно полируют поверхность зуба. Не содержащие фтора пасты Pressage разработаны для очистки поверхности зуба перед отбеливанием и нанесением протравочных, адгезивных и герметизирующих средств.

## Показания

### ■ MERSSAGE REGULAR

Степень абразивности – РДА 170-180, содержит фтор  
Merssage Regular – со вкусом перечной мяты – используется для удаления дисколорации, в начале профилактических процедур, удаление налета, а также для очистки зубной поверхности после удаления ортодонтических фиксирующих элементов.

### ■ MERSSAGE FINE

Степень абразивности – РДА 40-50, содержит фтор  
Merssage Fine – со вкусом лимона – используется для удаления налета и наружных пятен с зубной поверхности, а также для полировки после удаления камней и отбеливания.

### ■ MERSSAGE PLUS

Индекс абразивности РДА < 10, содержит фтор  
Merssage Plus – со вкусом апельсина – предназначена для полировки после удаления налета и отбеливания, для предупреждения повторного появления пятен, очистки реставрационных материалов и полировки поверхности.

### ■ PRESSAGE

Индекс абразивности – 170-180, содержит фтор  
Безвкусная паста Pressage используется для очистки поверхности перед отбеливанием и нанесением протравливающих и адгезивных средств и герметиков для фиссур. Паста не содержит фтора, т.к. он может ослабить прочность адгезии и эффект отбеливания.



Номер	Кол-во	Изделие
0572	1 тюбик	Merssage Regular, 40 г
0573	1 тюбик	Merssage Fine, 40 г
0575	1 тюбик	Merssage Plus, 38 г
0574	1 тюбик	Pressage, 40 г



Об./мин. макс: 2 000

Используйте без ирригации водой!