

OneGloss M

MOUNTED

One-step Finierer und Polierer
für Komposit



Finieren und Polieren mit

Die einstufigen Silikonpolierer mit Aluminiumoxid bieten das ideale Finish für alle Arten von Komposit-Restaurationen, indem einfach der Kontaktdruck von der Ausarbeitung bis zur Politur verändert wird.

- OneGloss M Polierer sind auf einen Winkelstück-Schaft aus Edelstahl montiert und sterilisierbar
- Ausarbeitung mit hohem Anpressdruck (ca. 1,0 N)
- Politur mit federleichtem Anpressdruck (ca. 0,3 N)
- Entfernung von Komposit- oder Zementüberschuss und Schmelzpolitur mit mäßigem bis federleichtem Druck
- Schmelzpolitur nach Entfernung von Brackets und von Zahnstein oder zur Beseitigung von Verfärbungen mit nur federleichtem Anpressdruck
- Empfohlener Drehzahlbereich 3.000 min^{-1} - 10.000 min^{-1} mit intermittierendem Wasserspray; maximal zulässige Drehzahl von 15.000 min^{-1} nicht überschreiten



einem Instrument

Formenauswahl

Das Sortiment umfasst vier Formen, die optimal auf die zu bearbeitenden Zahnflächen abgestimmt sind.


Kelch

für Höcker, inzisal,
okklusal



Midispitze

für labial, lingual,
bukkal, okklusal

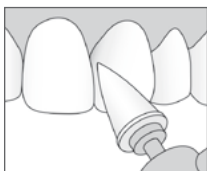


Minispitze

für Fissuren,
zervikal



IC

für labial, lingual,
bukkal, interproximal

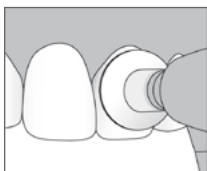

Bestellinformationen

OneGloss M

mit Winkelstück-Schaft, 12 St. pro Packung



Form: Minispitze
Bestell-Nr. 0186



Form: Kelch
Bestell-Nr. 0187



Form: Midispitze
Bestell-Nr. 0188



Form: IC
Bestell-Nr. 0189



SHOFU DENTAL GmbH

Am Brüll 17 · 40878 Ratingen
Telefon: 0 21 02/86 64 - 0 · Fax: 0 21 02/86 64 - 64
info@shofu.de · www.shofu.de