

OneGloss ■ OneGloss PS

для композитов и зубной эмали

Инструменты OneGloss и OneGloss PS изготовлены из высококонцентрированного оксида алюминия с силиконовой связкой. Полиры OneGloss PS (Plastic Shank – пластмассовый хвостовик) устанавливаются на прочную пластмассовую мандрель. Благодаря гигиеничной упаковке проблем с хранением и использованием инструментов не возникнет. Так как инструменты являются одноразовыми, в случае их использования стоматологический кабинет работает эффективнее.

Чтобы перейти от финирирования к полировке, используя один и тот же инструмент, достаточно всего лишь изменить усилие нажима:

- финирирование при сильном усилии нажима (приблизительно 1 N)
- полировка перьеобразными касаниями зоны контакта (приблизительно 0,3 N)
- удаление избыточного цемента и полировка эмали с умеренным и легким усилием нажима
- удаления изменений цвета на поверхности без повреждения эмали при легком усилии нажима



OneGloss ■ OneGloss PS (Продолжение. Начало – на стр. 25)

для композитов и зубной эмали



Показания

■ В КАБИНЕТЕ

Инструменты разработаны для одноэтапного финирирования и полировки любых композитных реставраций и зубной эмали, удаления лишнего цемента без ущерба для хрупких вкладок, удаления пятен с поверхности и полировки зубной эмали после профессиональной очистки.



OneGloss:

Об./мин. Реком.: 3 000-10 000 / макс: 15 000
УН: 0,3 Н для полировки и / 1,0 Н для финирирования



OneGloss PS:

Об./мин. Реком.: 3 000-5 000 / макс: 5 000
УН: 0,3 Н для полировки и / 1,0 Н для финирирования



Форма	Чаша	Мидиконус	IC	Миниконус	Мандрель
№ по ISO	060	060	100	030	
	0181	0182	0183	0186	0435

Для справки

При высоком усилии нажима либо во время полировки эмали используйте прерывистую ирригацию водой.

Полиры OneGloss и OneGloss PS являются одноразовыми.

ПРЕИМУЩЕСТВА

Силиконовые полиры с оксидом алюминия

Оптимальное соотношение скорости и усилия нажима

Финирирование и полировка всего одним инструментом

Нет необходимости менять инструменты

Полировочная паста не требуется

Оптимальная абразивность

Низкий уровень вибраций



Силиконовые полиры OneGloss PS (с пластиковыми хвостовиками) продаются в собранной виде, т.е. насадка (кубок, мидиконус, IC) уже установлена поверх износостойчивой пластмассовой мандрели.

Номер	Кол-во	Изделие
OneGloss		
0180	1 шт.	OneGloss Kit (набор), 60 несмонтированных полиров (кубок, мидиконус и диск – по 20) и 3 мандрели CA
0181-0183	1 шт.	Расходные материалы OneGloss расходные материалы, 50 шт., несмонтированы, формы: кубок, мидиконус, диск
0186	12 шт.	Миниконус OneGloss, смонтирован, хвостовик CA
0435	6 шт.	мандрели CA
OneGloss PS		
0175	1 шт.	OneGloss PS Kit (набор), 50 шт.: 15 кубов, 15 дисков, 20 мидиконусов, каждый – в отдельной упаковке
0176	50 шт.	OneGloss PS, форма: кубок, каждый инструмент – в отдельной упаковке
0177	50 шт.	OneGloss PS, форма: мидиконус, каждый инструмент – в отдельной упаковке
0178	50 шт.	OneGloss PS, форма: IC, каждый инструмент – в отдельной упаковке