

Алмазные инструменты TPE

безопасные для десен алмазные инструменты с препарирующим кончиком для обработки уступа под десной

Важной особенностью этих алмазных инструментов является то, что скос, который переходит в режущую поверхность, не покрыт. Это позволяет не травмировать прилегающие ткани и не вырезать осевую стенку в процессе препарирования уступа. Алмазные инструменты TPE (Tissue-Protective, End-Cutting – безопасный для мягких тканей препарирующий кончик) выпускаются с кончиком стандартной длины с мелким и крупным зерном, а также с коротким кончиком с крупным зерном.

Номер	680C-1	680F-1	682C-1	682F-1	682S-1	684C-1	684F-1	684S-1	686C-1	686F-1
№ по ISO	010	010	012	012	012	014	014	014	016	016
Длина рабочей части, мм	9,0	9,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0	6,0	9,0	9,0
Диаметр, мм	1,0	1,0	1,2	1,2	1,2	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Безопасный для мягких тканей препарирующий кончик
- Точная центровка
- Продолжительный срок службы
- Надежность препарирования

Показания

В КАБИНЕТЕ

- Крупнозернистые (С - без пометки на хвостовике): для быстрого уменьшения края уступа в зубодесневом кармане
- Мелкозернистые (F - с красной полосой на хвостовике): для гладкого финирирования края уступа и финирирования отпрепарированного уступа под десной

Короткий кончик (только с крупным зерном) рекомендуется использовать при ограниченном доступе.

Сфера применения

Зубная эмаль – препарирование уступа



В набор алмазных инструментов TPE входят девять инструментов.

Об./мин. Реком.: 300 000 - 450 000 / УН: 0 - 0,8 Н

Номер	Кол-во	Изделие
680C-1- 686F-1	6 шт.	Алмазные инструменты TPE, хвостовик FG
0688	1 шт.	TPE Diamonds Kit (набор)