


DirectDia Paste

Pâte diamantée pour lustrage intra et extra-oral

DirectDia est une pâte à polir, imprégnée de 20% de diamant synthétique (taille des grains entre 2 et 4 µm). Cette pâte procure rapidement un lustrage impeccable des matériaux de restauration (céramiques, composites ou métaux) mais également des dents naturelles. Dégageant une agréable senteur citronnée, la pâte se repère facilement en bouche grâce à sa couleur verte.



La taille d'un grain de riz suffit pour une dent

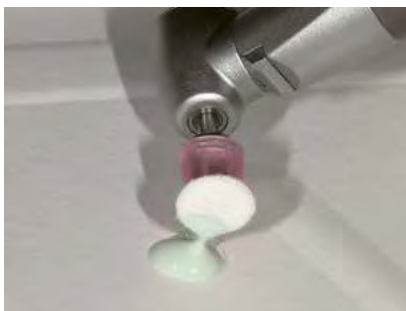

Utilisation du disque Super-Snap Buff Disk



Facile à repérer avec sa couleur verte

Indications

- Elimination des colorations et lustrage de tous les matériaux de restauration
- Nettoyage (plaque) et polissage des dents naturelles

| Réf. | Quantité | Produit |
|------|------------|---|
| 0558 | 1 seringue | DirectDia Paste, 3 g 2 embouts doseurs avec capuchon |

AVANTAGES

Couleur verte pour se distinguer en bouche

Dosage précis dû à l'appliqueur

Viscosité facilitant la manipulation

Agréable senteur citronnée

info

Il est recommandé d'utiliser la pâte avec les disques Super-Snap Buff Disk et Buff Mini-Disk. Ces disques flexibles en feutre garantissent une procédure efficace et permettent l'accès à toutes les zones. Pour éviter les éclaboussures ainsi qu'un échauffement excessif, veiller à rester sous la vitesse de 10.000 t/min.

La surface à traiter n'a pas besoin d'être sèche. A la fin, il suffit de rincer soigneusement à l'eau.

