

FL-Bond II

Sistema de bonding autograbante con liberación de flúor

FL-Bond II es un sistema adhesivo autograbante de dos pasos con excelentes propiedades de adhesión al esmalte y la dentina para un sellado marginal seguro. El sistema destaca por su facilidad de uso y por unas magníficas propiedades biocompatibles. La moderada consistencia fluida de FL-Bond II permite una aplicación cómoda y es particularmente estable en las paredes inclinadas de las cavidades. Esto garantiza un espesor homogéneo de la película en todas las superficies de preparación y una potente unión adhesiva.

Ámbitos de aplicación

- Fijación adhesiva de composites al tejido dental duro
- Pretratamiento del tejido dental duro para el uso de cementos de resina
- Reparación de restauraciones

VENTAJAS

- Aplicación rápida y sencilla en 2 pasos
- Viscosidad y adhesión perfectas
- Radiopacidad para diagnósticos eficaces
- Liberación y recarga de flúor
- Fuerza adhesiva constante



Ref.	Cantidad	Producto
1306	1 ud.	FL-Bond II Kit Primer 5 ml, agente adhesivo 5 ml, MicroBrush rosa y amarillo, c/u 25 uds. 1 bandeja de mezcla, 1 tapa
1307	5 ml	FL-Bond II Primer
1308	5 ml	FL-Bond II agente adhesivo
1309	6 ml	FL-Bond II Etchant (agente de grabado)

Ámbito de aplicación


■ 1. PASO: IMPRIMAR

El imprimador FL-Bond II contiene un nuevo y potente monómero adhesivo y un nuevo fotoiniciador. El imprimador autograbante prepara las superficies de esmalte y dentina, eliminando de esa manera la necesidad de realizar el grabado con ácido fosfórico por separado.

■ 2. PASO: BONDING


El agente adhesivo FL-Bond II contiene relleno S-PRG con flúor que ofrece una protección permanente de las caries recurrentes mediante la remineralización optimizada del tejido dental duro colindante. Debido al elevado porcentaje de relleno, FL-Bond II es especialmente resistente a la abrasión y evita con eficacia la erosión de las zonas marginales con el sellado permanente.

Viscosidad baja (otros sistemas de bonding)

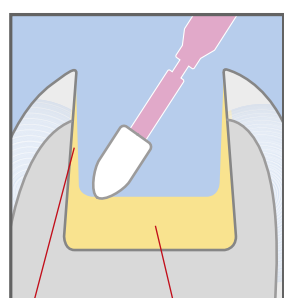

Capa de bonding muy fina
Acumulación de fluido en el fondo de la cavidad

Viscosidad moderada (FL-Bond II)

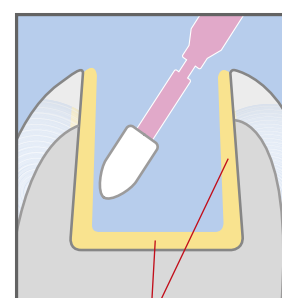

Espesor de la capa de bonding homogéneo

info

El agente de grabado FL-Bond II Etchant está especialmente indicado para grabar antes de utilizar sistemas de bonding autograbantes en el esmalte; contiene solo aprox. un 7 % de ácido fosfórico.