

OneGloss M

MOUNTED

Acabado y pulido en un solo paso
para composite



Acabado y pulido con un

Los pulidores de silicona OneGloss M de un solo paso contienen óxido de aluminio y proporcionan el acabado ideal para todos los tipos de restauraciones de materiales compuestos simplemente al modificar la presión de contacto, desde el acabado hasta el pulido.

- OneGloss M están montados en mandriles de contra-ángulo (CA) de acero inoxidable y son esterilizables
- El acabado se realiza con una fuerte presión de contacto (aprox. 1,0 N)
- El pulido se realiza con una presión de contacto ligera (aprox. 0,3 N)
- Eliminación del exceso de composite o cemento y pulido del esmalte con presión de contacto moderada a ligera
- Pulido del esmalte después del descementado ortodóntico, después de la limpieza o para la eliminación de la decoloración de los dientes con una ligera presión de contacto
- Rango de velocidad recomendado 3.000 min^{-1} - 10.000 min^{-1} con spray de agua intermitente; la velocidad máxima permitida de 15.000 min^{-1} no se debe exceder



instrumento

Selección de la forma

La línea de productos incluye cuatro formas, que están adaptadas para las superficies que se van a tratar.


Copa

para cúspides,
incisal y oclusal




Midipunta

para labial, lingual,
bucal, oclusal

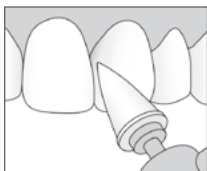


Minipunta

para fisuras,
cervical

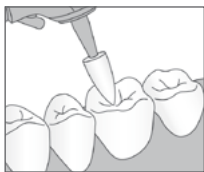

IC

para labial, lingual,
bucal, interproximal

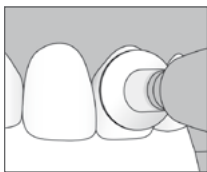

Información de pedidos

OneGloss M

Con mandril de contra-ángulo (CA), 12 piezas por caja



Forma: Minipunta
Ref. 0186



Forma: Copa
Ref. 0187



Forma: Midipunta
Ref. 0188



Forma: IC
Ref. 0189

