

PINK THE GUM

by German Bär



■ CERAMAGE

■ CERAMAGEUP

LITE ART



SHOFU DENTAL GmbH

www.shofu.de



Auftrag von CRB 1 auf das mit 2 Bar / 50 µm Al₂O₃ abgestrahlte Gerüst, 10 Sek. einwirken lassen



Auftrag von CRB 2, 10 Sek. einwirken lassen, 3 Min. lichthärten



Auftrag der weißlichen attached Gingivaanteile mit Ceramage UP ODA1 mit Pinsel



Anlegen roter Adern der Mukosa mit Lite Art R (Red)



Anlegen blauer Adern der Mukosa mit Lite Art BI-G (Blue Gray)



Auftrag von Ceramage UP GUM-T



Modellieren und Abdecken der Adern der Mukosa mit Flachpinsel, 60 Sek. lichthärten



Auftrag von Ceramage GUM-D im Bereich der Alveolentäler und Interdentalpapillen



Anatomisches Anmodellieren der Alveolentäler mit Flachpinsel



Anatomisches Anmodellieren der Interdentalpapillen mit Flachpinsel



Auftrag von Ceramage GUM-Or im Bereich der attached Gingiva



Anatomisches Anmodellieren der Bereiche der attached Gingiva mit Flachpinsel



Auftrag von Ceramage GUM-D im Bereich des mukogingivalen Übergangs



Anmodellation zur Mukosa hin auslaufend mit Flachpinsel



Auftrag der freien Gingiva mit Ceramage GUM-L



Anatomisches Anmodellieren der freien Gingiva mit Flachpinsel



Auftrag von Ceramage GUM-T



Anatomisches Anmodellieren der mukogingivalen Übergänge mit Flachpinsel



Finales Ausmodellieren und Komplettieren mit Ceramage GUM-T und Flachpinsel, 60 Sek. lichthärten



Auftrag von Oxy-Barrier vor der Endpolymerisation, 3 Min. lichthärten



Ausarbeiten mit Dura-Green



Vorpolitur mit SoftCut



Glanzpolitur mit Dura-Polish



Hochglanzpolitur mit Dura-Polish DIA

