

# EyeSpecial C-IV

## SHOFU Cross Polarizer

NL

Lees de bijgevoegde 'Belangrijke veiligheidsinstructies' van de EyeSpecial C-IV voordat u dit polarisatiefilter gebruikt.

Dit product is alleen geschikt voor de EyeSpecial C-IV of nieuwere modellen. Het is niet compatibel met de voorgangermodellen EyeSpecial C-II en C-III.

### Beoogd gebruik

Het beter doen uitkomen van de oppervlaktestructuur of inwendige structuur van natuurlijke gebitselementen, zoals mamelonstructuren of barstjes die bij een 'normale' opname nauwelijks zichtbaar zijn.

### Vorbereiding

Activeer de modus voor kruispolarisatie voordat u het filter voor de eerste keer gebruikt (activering is maar één keer nodig).

#### 1. Activeren van de modus voor kruispolarisatie

Scan de onderstaande QR-code om de modus voor kruispolarisatie te activeren. Als de melding 'Change the optional setting?' verschijnt, drukt u op 'OK'.



QR-code voor het activeren van de modus voor kruispolarisatie

#### 2. Opslaan als gebruikersgedefinieerde modus

Scan de onderstaande QR-code om de modus voor kruispolarisatie als gebruikersgedefinieerde modus (custom) op te slaan. Als de melding 'Select the number' verschijnt, kiest u een van de drie gebruikersgedefinieerde instellingen. Zorg er hierbij voor dat de camera in de opnamemodus staat (dit is een van de negen voorgeprogrammeerde modi). U kunt namelijk geen QR-code scannen in de gebruikersgedefinieerde modus.



QR-code voor het opslaan van de gebruikersgedefinieerde modus

### Fotograferen

#### 1. Selecteer de gebruikersgedefinieerde modus

Voordat u een foto maakt, controleert u of het symbool voor de gebruikersgedefinieerde modus links boven op het scherm wordt weergegeven.




#### 2. Monteer de macrolens

Monteer de macrolens op het objectief van de camera en draai hem met de klok mee totdat hij goed vastzit.

#### 3. Breng het polarisatiefilter aan

Plaats de SHOFU Cross Polarizer voorzichtig op de macrolens, zoals aangegeven op de tekening hiernaast, totdat hij hoorbaar vastklikt.

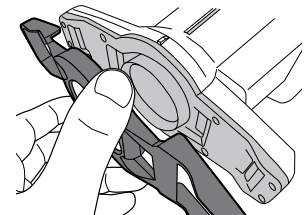


#### 4. Maak een foto

Een foto maken gaat op dezelfde manier als in de modus Telemacro. Zie hiervoor de gebruikershandleiding (User's Manual) van de camera.

#### 5. Verwijder het polarisatiefilter


Om het polarisatiefilter er weer af te halen, tilt u voorzichtig de palletjes aan beide zijden van de camera op en drukt u het filter naar buiten.

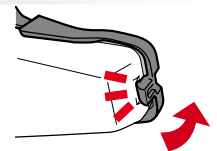

### QR-code scannen



1 Druk in de opnamemodus op **[Custom]** of op de F2-toets

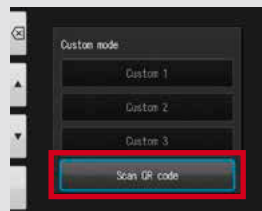

2 Selecteer "Scan QR code"



3 Druk op de ontspanknop om te gaan scannen



Manufacturer  
**SHOFU INC.**

11 Kamitakamatsu-cho,  
Fukuine, Higashiyama-ku,  
Kyoto 605-0983, Japan

EC REP SHOFU DENTAL GmbH

An der Pönt 70, 40885 Ratingen, Germany www.shofu.com